



Nijland Cycling

Gebruiksaanwijzing



• SUELO •

Nijland Cycling B.V.
Telgenweg 12
8111 CM Heeten

www.nijland.com
info@nijland.com
+31(0)572 382 222

Model:	EAN:
Suelo	8720261260501
Suelo E	8720261260518

Uitgifte datum: 03-07-2023

Versie: 1

Taal: Nederlands

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Contactgegevens	5
Conformiteit	5
Eerste gebruik	5
Gebruik	5
1. Tips	6
2. Onderhoud	6
3. Veiligheid	7
4. Voorkom diefstal	8
5. Verlichting	8
6. Banden	8
7. Remmen	8
8. Zadel	9
9. Stuur	10
10. Versnelling	10
11. Slot	11
12. Accessoires	11
13. Bagagedrager	11
14. Milieu	12
15. Transport en stalling	12
Dimensies	12
Specificaties	13
Garantie	14
Garantiebewijs	15
Formulier service, onderhoud en modificaties	16
Onderhoudshistorie	17
Notities	18

INLEIDING

Deze gebruiksaanwijzing geeft u belangrijke informatie over het gebruik van de Suelo en Suelo E. Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing goed door te nemen voordat de fiets in gebruik genomen wordt. Het zal u vertrouwd maken met de belangrijkste onderdelen en noodzakelijke handelingen om veilig en prettig weg te fietsen. Volg altijd de instructies zoals deze in de gebruiksaanwijzing zijn opgenomen en bewaar deze zorgvuldig. De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kan bij Nijland Cycling worden opgevraagd.

Wij wensen u vele jaren fietsplezier!

Team Nijland Cycling

CONTACTGEGEVENS

📍 Nijland Cycling B.V.
Telgenweg 12
8111 CM Heeten
☎ +31(0)572 382 222

✉ info@nijland.com
🌐 www.nijland.com

CONFORMITEIT

Nijland Cycling verklaart als fabrikant dat de Suelo en Suelo E worden geproduceerd conform de NEN-EN 15194:2017 Fietsen - Elektrisch ondersteunende fietsen. De conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de fabrikant.

EERSTE GEBRUIK

Uw dealer is verplicht om onderstaande punten met u door te nemen.

1. Verzeker u ervan dat de fiets juist is afgesteld voor uw lichaamslengte en gewicht.
2. Oefen in een rustige omgeving om vertrouwd te raken met de fiets en een goede controle te ontwikkelen.
3. Oefen het gebruik van de handremmen op verschillende soorten ondergrond.
4. Probeer op verschillende snelheden te fietsen en leer hoe u het evenwicht moet bewaren.
5. Neem de tijd om te wennen aan de fiets en verhoog geleidelijk de afstand van de tocht.
6. Controleer regelmatig de fiets en zorg ervoor dat alles op de juiste manier werkt en is afgesteld.

Paraaf Dealer: _____ **Datum:** _____

GEBRUIK

De Suelo (E) is gemaakt voor het grootst mogelijke gemak bij het op- en afstappen. Dit wordt mogelijk door de kenmerkende, zeer lage én ruime instap. De lage positie van het zadel maakt dat u altijd bij het stoppen met beide voeten stevig op de grond kunt staan. Daarbij beschikt de Suelo E over een elektromotor in de voorwielnaaf die u bij het rijden ondersteunt. Dankzij de wegrijdfunctie kunt u moeiteloos wegrijden zonder veel kracht te zetten. De elektromotor geeft u 'een duwtje in de rug'. Met het bedieningspaneel op het stuur geeft u zelf aan hoeveel ondersteuning u wenst. Er zijn 9 ondersteuningsstanden. Zelfs wegrijden vanuit stilstand zonder zelf mee te trappen is mogelijk met de optionele duimgashendel. Daarnaast is de Suelo E ontworpen om u een zo veilig mogelijk gevoel te geven. Niet alleen biedt de zeer lage instap veel ruimte voor uw voeten bij het opstappen, ook de pedalen zijn verder naar voren zijn geplaatst dan bij een traditionele fiets en het zadel iets naar achteren. Hierdoor kan het zadel lager worden geplaatst, kunt u de voeten stevig op de grond zetten en wordt de rijstabiliteit vergroot. Eerst makkelijk gaan zitten en dan pas wegrijden. Dat kan bij de Suelo E.

1. TIPS

- Gebruik voor het schoonmaken nooit een hogedrukreiniger, het water kan vet wegnemen en draaiende onderdelen eerder laten slijten. Gebruik hiervoor een schone doek.
- Smeer de remnaven nooit in met smeermiddelen, dit kan de werking verminderen.
- Als u of uw dealer het stuur/zadel in de hoogte wil verstellen, moet er rekening mee gehouden worden dat de veiligheidsmarkering niet te zien mag zijn.
- Zorg ervoor dat u goed gezien wordt; bij slecht zicht dient u de verlichting in te schakelen. Dit geldt ook voor de avonduren.
- Wij raden u aan een fietsverzekering af te sluiten. Zorg dat u een aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

2. ONDERHOUD

Uw dealer is verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw fiets. Wanneer u lang wilt genieten van uw fiets is het van groot belang dat u onderstaande punten controleert.

Maandelijks:

Controleer iedere maand uw bandenspanning, de kettingspanning en smering, werkt de verlichting naar behoren, zijn de remmen nog goed afgesteld, zitten de pedalen en cranks nog goed vast, check het balhoofdstel op speling, is de spaakspanning juist, zit er geen slinger in het wiel en check of de zadel- en stuurpen goed vast zitten.

Halfjaarlijks:

Vet de zadelpen en stuurpen in, inspecteer of de wielassen goed vastzitten, check de bevestigingsbouten, bekijk het balhoofdstel op eventuele speling, controleer de schroeven van het zadel en het stuur, smeer de pedaas in met vet.

Jaarlijks:

Laat uw fiets minimaal één keer per jaar controleren door uw dealer op de volgende punten: Aandrijving, frame, voorvork, wielophanging, verlichting, spaakspanning, remmen en de lagers. Tevens dient de velg te worden gecontroleerd op vervorming, scheuren en roestvorming.

Achterin deze handleiding treft u de onderhoudshistorie aan, hier vindt u een overzicht van alle onderhoudsactiviteiten die zijn uitgevoerd op uw fiets.

Let op! Onderdelen die tijdens onderhoud worden vervangen, moeten van hetzelfde merk en type zijn als degene die worden gebruikt door Nijland Cycling.

3. VEILIGHEID

- De fiets is persoonsgebonden.
- Zorg dat de maatstelling van de fiets is afgesteld op u als gebruiker.
- Zorg ervoor dat elke keer voordat de fiets wordt gebruikt, deze in goede conditie verkeert. Controleer vóór elke rit de correcte werking van de remmen, de correcte werking van de verlichting en zorg ervoor dat er voldoende lucht in de banden aanwezig is.
- Controleer met regelmaat of de wielen, het stuur en het zadel goed vast zitten en ook of alle schroefverbindingen goed aangedraaid zijn.
- Gebruik de fiets op een zo solide en vlakke ondergrond mogelijk. Hou rekening met kuilen en oneffenheden, pas hierop uw snelheid aan.
- Pas op dat wijde broeken, wapperende kledingstukken en losse veters niet vast komen te zitten in de ketting, de spaken of de pedalen.
- Gebruik voor het reinigen geen hogedruk- of stoomreiniger.
- Zet de fiets te allen tijde op slot als u de fiets onbeheerd achterlaat.
- Let op dat er zich bij afdalingen geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt. Rem tijdig en pas uw snelheid aan naar de omstandigheden.
- Houd er rekening mee dat de remafstand bij slecht weer beduidend langer is op nat wegdek.
- Tijdens een zwangerschap is extra voorzichtigheid vereist in verband met een verhoogde kans op letsel.
- Bij de elektrisch ondersteunde Suelo: Neem de tijd om aan de functies van de ondersteuning te wennen. Let altijd goed op als u de ondersteuning inschakelt. Oefen met het versnellen van de elektromotor.
- Laat na een ongeval of valpartij de fiets controleren, ook als er geen zichtbare schade is.
- Neem altijd een mobiele telefoon mee en zorg dat u het telefoonnummer van uw dealer in uw contacten heeft staan.
- Zorg ervoor dat u altijd goed voorbereid op pad gaat.
- Let op met het nemen van haakse/scherpe bochten en drempels, pas hierop uw snelheid aan.

4. VOORKOM DIEFSTAL

- Zet uw fiets altijd op slot.
- Als u een kabelslot gebruikt, dan kunt u uw fiets verankeren aan een hek of een paal. Als de kabel lang genoeg is, haal hem dan door zowel het frame als het voorwiel
- Noteer het framenummer. Dit nummer staat op de fiets vermeld door middel van een sticker. Vaak is deze op de zadelbuis te vinden.

Framenummer: _____

5. VERLICHTING

Bij de elektrisch ondersteunde Suelo is de verlichting aangesloten op de accu. Dit betekent dat u de verlichting aan kunt zetten door de plus (+) knop op de stuurbediening 2 seconden in te drukken. De voor- en achterlamp gaan dan tegelijk aan. Wilt u de verlichting weer uitzetten, dan drukt u nogmaals 2 seconden op de plus (+) knop. De niet- elektrisch ondersteunde Suelo is uitgevoerd met batterijverlichting. U kunt de koplamp in- en uitschakelen door het aan/uit knopje op de koplamp in te drukken. U kunt het achterlicht in- en uitschakelen door het aan/uit knopje op het achterlicht in te drukken.

6. BANDEN

Als uw banden niet op de juiste spanning zijn dan zullen ze sneller slijten. Daarom raden wij u aan regelmatig te controleren of uw banden op de juiste spanning zijn. De banden zijn op de juiste spanning, wanneer u ze nog net iets met uw duim in kunt drukken. U rijdt op harde banden veel plezieriger, want u hoeft minder kracht op de pedalen te zetten. Een juiste bandenspanning vereenvoudigt tevens het sturen.

7. REMMEN

De Suelo en Suelo E zijn uitgevoerd met een terugtrapnaaf, of een freewheelnaaf.

Terugtrapnaaf:

Wanneer u de pedalen achteruit beweegt wordt het achterwiel geremd.

U heeft alleen een remhendel aan de linkerzijde. Deze is bestemd voor de voorrem.

Freewheelnaaf:

Met een freewheelnaaf kunt u niet remmen via de pedalen, dit kan alleen met de remhevels aan het stuur. U heeft zowel links als rechts een remhendel.

De remmen behoren tot de belangrijkste onderdelen van uw fiets. Gebruik beide remmen zoveel mogelijk om uw snelheid te verminderen. Controleer voordat u op pad gaat altijd of de remmen goed werken. Als u merkt dat de remhendels (bijna) tegen het handvat moeten worden getrokken voordat de fiets afremt, moeten de remmen opnieuw worden afgesteld of de remblokjes worden vervangen. De fiets kan worden uitgerust met een terugtrapremnaaf of een vrijloopnaaf. Indien uw fiets over een vrijloopnaaf beschikt, heeft u twee remhendels aan het stuur. De linker remhendel is bestemd voor de voorrem, de rechter remhendel is bestemd voor de achterrem. Bij een fiets met een terugtrapremnaaf heeft u een remhendel aan het stuur, deze zit aan de linkerzijde en is bestemd voor de voorrem. De achterrem kunt u activeren door middel van het terugdraaien van de pedalen.

8. ZADEL

Wanneer u op het zadel zit, is deze op de juiste hoogte afgesteld als u uw schoen vlak op de grond kan zetten.

De hoek van het zadel kan worden versteld door de bout los te draaien met steeksleutel (Figuur 1). Na het verstellen van het zadel moet de klem goed vastgezet worden.

Let op: De veiligheidsmarkering op de zadelpen mag niet zichtbaar zijn als het zadel in de zadelbuis zit (Figuur 2).



Figuur 1: Zadel verstellen



Figuur 2: Hoogtemarkering

9. STUUR

Het stuur is in hoogte te verstellen, dit kunt u doen door de expanderbout los te draaien met behulp van een steeksleutel en het stuur omhoog/omlaag te duwen (Figuur 3).

Let op: De veiligheidsmarkering op de stuurpen mag niet zichtbaar zijn als het stuur in de stuurbuis zit (Figuur 4).



Figuur 3: Draai de bout los met een inbussleutel



Figuur 4: Hoogtemarkering

10. VERSNELLINGEN

Als uw fiets versnellingen heeft, dan is er een gripshift (versnellingscommandeur) op uw stuur aanwezig (Figuur 5).

Wanneer u richting de + draait, kunt u zwaarder trappen.
Wanneer u richting de - draait, kunt u minder zwaar trappen.



Figuur 5: Gripshift

11. SLOT

De Suelo is voorzien van een veiligheidsringslot.
Het veiligheidsslot is op de volgende manier te bedienen (Figuur 6):

1. Draai de sleutel in het slot rechtsom.
2. Duw de schuifhendel naar beneden, zodat het slot het achterwiel vergrendeld.
3. Draai de sleutel in het slot linksom en verwijder de sleutel uit het slot.

U kunt het wiel ontgrendelen door de sleutel in het slot te steken en rechtsom te draaien.



Figuur 6: Ringslot

12. ACCESSOIRES

Er zijn diverse accessoires voor uw Suelo of Suelo E fiets verkrijgbaar, informeer hiervoor bij uw dealer.

13. BAGAGEDRAGER

De bagagedrager kan worden gebruikt voor kleine tassen of andere voorwerpen (Figuur 7).
De lading op de bagagedrager mag niet meer dan 25 kilogram bedragen.



Figuur 7: De bagagedrager

14. MILIEU

Een defecte, lekkende, gevallen of vervormde accu dient direct te worden vervangen.
De oude accu dient te worden ingeleverd bij de dealer of de milieustraat van de gemeente.

15. TRANSPORT EN STALLING

- Mocht u de fiets willen vervoeren met de auto, zorg ervoor dat dit veilig gebeurt.
- Wij raden het aan om de fiets droog te stallen.
- Als u de fiets voor langere tijd stalt, raden wij aan om deze eerst te reinigen.
- Als u de fiets na langere tijd niet gebruikt te hebben weer gaat gebruiken, dan is het belangrijk de bandenspanning te controleren en zo nodig de banden op te pompen. Ook is het belangrijk de accu opgeladen op te slaan, en met enige regelmaat op te laden om diepontlading te voorkomen.

DIMENSIES

Totale lengte:	187 cm
Totale breedte:	72 cm
Gewicht:	25 kg, electric model: 35 kg
Geschikte binnenbeenlengte:	73 cm
Crank lengte:	15 cm
Maximale belasting:	110 kg
Instaphoogte:	18 cm
Max. toelaatbaar gewicht bagagedrager:	25 kg
Bandenmaat voor:	26 x 1.75 inch
Bandenmaat achter:	26 x 1.75 inch
Bandenspanning:	Voor: 3 - 5 bar / Achter: 3 - 5 bar

SPECIFICATIES

Frame:	Stalen frame met poedercoat lak
Kleur:	Zwartgrijs / Zwartbruin / Wenskleur
Elektrisch systeem:	Bafang 250W Voorwielmotor
Accu:	Standaard 36V 10,4Ah (400W) uit te breiden naar 36V 13,6Ah (500W)
Verlichting:	Bij elektrisch model op accu, bij niet elektrisch model is de verlichting op batterij
Aandrijving:	7-versnellingen terugtrapnaaf, 7-versnellingen freewheelnaaf of vaste single-speed naaf
Kettingkast:	Gesloten kettingkast
Stuur:	Aluminium mat stuur
Zadel:	Comfort zadel
Wielen:	Ryde Andra 40 velgen met RVS spaken
Spatborden:	stalen spatborden
Banden:	Schwalbe Road Cruiser / Marathon Plus
Pedalen:	Zwart pedaal SP-880 PP met antislip
Cranks:	Zwart stalen cranks
Voorrem:	V-brake (velgrem)
Achterrem:	Rollerbrake
Opties:	Diverse opties beschikbaar, vraag uw dealer

GARANTIE

- Nijland Cycling geeft 5 jaar garantie op frame en voorvork.
- De fiets heeft 2 jaar garantie. Exclusief onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
- Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is niet overdraagbaar.

Garantie wordt niet verleend indien:

- De fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of is beschadigd door een ongeval.
- De onderdelen aan gewone slijtage onderhevig zijn; ketting, banden, kabels enz.
- De fiets niet is onderhouden conform de instructies in hoofdstuk 2 en zoals aangegeven op blz. 14.
- Reparaties ondeskundig zijn uitgevoerd.
- De constructie van de fiets gewijzigd is.

Overige bepalingen

- U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien u het garantiebewijs samen met de aankoopbon kunt tonen.

GARANTIEBEWIJS

Dit garantiebewijs dient u zorgvuldig in te vullen en samen met uw aankoopbewijs te bewaren tot 5 jaar na aankoopdatum.

- **Fietsgegevens:**

Merk en type:

Framenummer:

Sleutelnummer:

Aankoopdatum:

- **Eigen gegevens:**

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

- **Dealer gegevens:**

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

FORMULIER SERVICE, ONDERHOUD EN MODIFICATIES

U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien uw fiets de servicebeurten heeft gehad volgens onderstaand schema.

Servicebeurt:	Uitgevoerd op:	Paraaf dealer:
Na eerste 200 km of 2 maanden		
Servicebeurt 1 jaar na aflevering		
Servicebeurt 2 jaar na aflevering		
Servicebeurt 3 jaar na aflevering		
Servicebeurt 4 jaar na aflevering		
Servicebeurt 5 jaar na aflevering		

Wij adviseren u om ook na 5 jaar uw fiets een jaarlijkse servicebeurt te geven. Het nalaten hiervan heeft geen gevolgen voor de garantietermijn omdat deze na 5 jaar is verstreken.

Modificatie aan de fiets

Gewijzigd:	Uitgevoerd op:	Uitgevoerd door:

Let op! Alleen Nijland Cycling mag een modificatie op deze fiets uitvoeren.

Indien u in het bezit bent van een digitale handleiding en u wenst een papieren handleiding, dan kunt u deze bij ons aanvragen.



ONDERHOUDSHISTORIE

