


Fitform 570 Vario zorgfauteuil

Uw welzijn, onze passie!

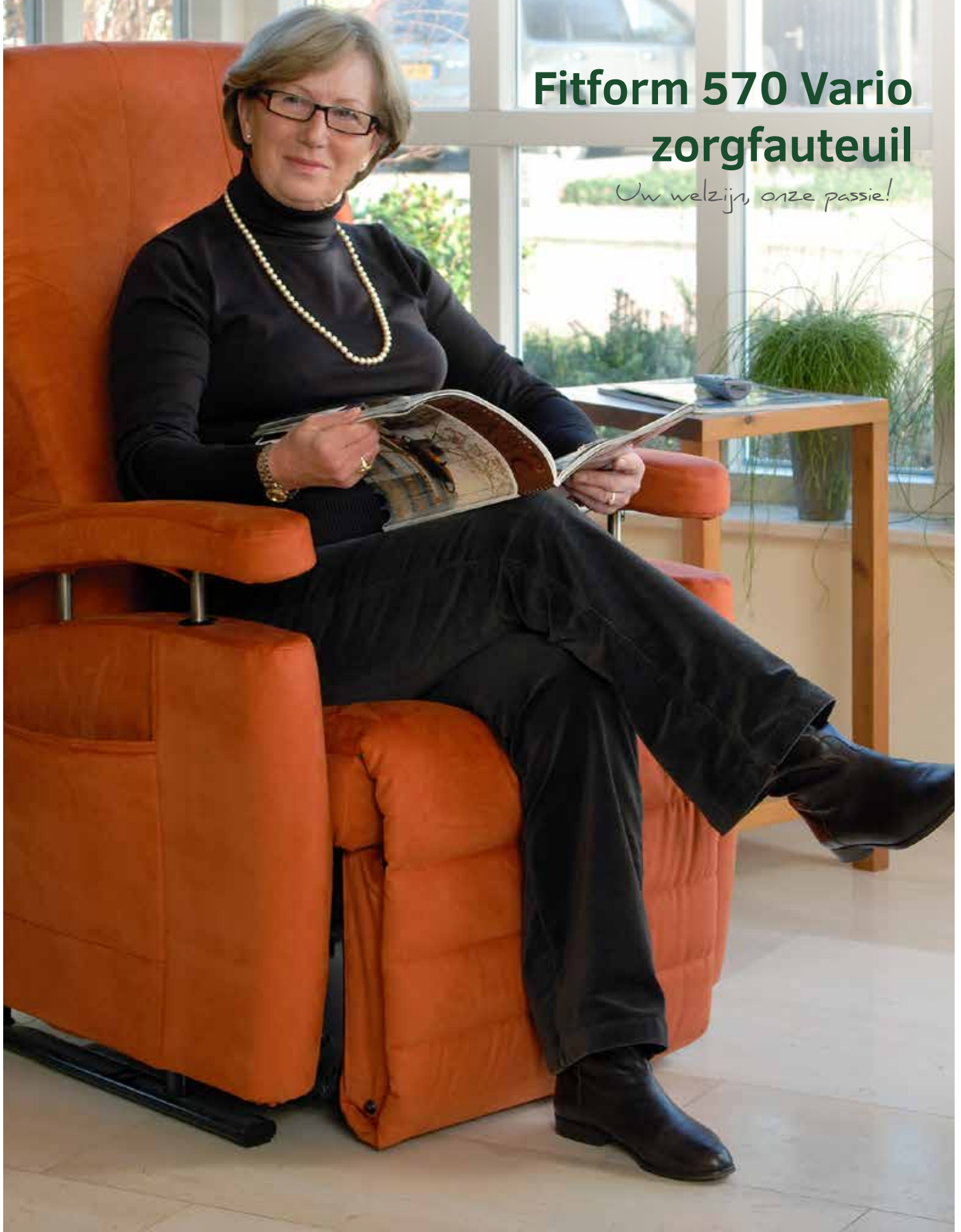

Gezond zitten voor iedereen

Speciaal voor mensen die langdurig zitten, heeft Fitform de zorgfauteuil 570 Vario ontwikkeld. Deze stoel is uitermate geschikt voor mensen voor wie goed zitten niet vanzelfsprekend is. Door de vele individuele zitoplossingen die de 570 Vario biedt, kan de stoel helemaal op iemands persoonlijke omstandigheden worden aangepast. Dit zorgt bij al meer dan 75.000 tevreden gebruikers voor meer welzijn en kwaliteit van leven.

Comfortabel zitten, rusten en gemakkelijk opstaan

Lang in één houding zitten, is niet verstandig. Daarom beschikt de Fitform 570 Vario over elektromotoren die worden bediend via een handbedieningskastje. Hiermee kan de stoel in verschillen standen worden gezet.



De meeste gebruikers van de 570 Vario hebben een stoel die uitgerust is met drie motoren. Dit biedt de volgende functies:

Beensteun

Met 1 druk op de gele knop klappt een beensteun uit, die de benen van de grond tilt waardoor ze goed tot rust kunnen komen.

Kantelverstelling

Bij het activeren van de rode knop kantelen de rugleuning en de zitting tegelijkertijd naar achteren. De hoek tussen de zitting en de rugleuning blijft hetzelfde, zodat lichaamshouding, ondersteuning en de stand van het bekken hun goede positie behouden. Door het kantelen vermindert de belasting op de rug en komt de gebruiker in een zeer comfortabele relaxhouding.

Rugleuningverstelling

Via de blauwe knop is de hoek tussen zitting en rugleuning instelbaar. Achterover gekanteld kan met deze functie de rugleuning nog verder naar achteren worden ingesteld om in een lighouding te komen. De benen liggen nu hoger dan het hart, wat goed is voor de bloedsomloop.

Sta-opfunctie

De opstalift tilt de gebruiker als het ware uit de fauteuil, waardoor opstaan veel gemakkelijker wordt. Dit kan met een aparte knop. Doordat de fauteuil in zijn geheel wordt opgetild en naar achteren wegdraait, blijven de voeten aan de grond. Dit zorgt voor balans en een eenvoudige manier van uit de stoel komen. Ook gaan zitten is een stuk gemakkelijker als de stoel in de sta-opstand staat. Dankzij de sta-opfunctie heeft de gebruiker geen hulp meer nodig bij opstaan en weer gaan zitten. Dit komt de zelfredzaamheid en zelfstandigheid ten goede!




Maatwerk

De Fitform 570 Vario zorgfauteuil is ontwikkeld om het leven van mensen met zitproblemen aangenamer te maken. Omdat ieder mens verschillend is, is de Fitform 570 Vario op maat instelbaar. De zithoogte, de zitdiepte en de arMLEuninghoogte kunnen geheel op maat worden ingesteld. De lendensteun onderin de rug kan de gebruiker zelf in hoogte en dikte instellen.

Dat geldt ook voor de geïntegreerde knikbare hoofdsteun. Daarnaast kan de gebruiker de bovenzijde van de rugleuning naar voren buigen; dit noemen we een 'topswing' rugleuning.

- 1 Zithoogte instelbaar van 40 tot 60 cm
- 2 Zitdiepte instelbaar van 43 tot 53 cm
- 3 ArMLEuninghoogte van 16 tot 29 cm
- 4 Lendensteun in hoogte en dikte instelbaar
- 5 Zithoek verstelbaar

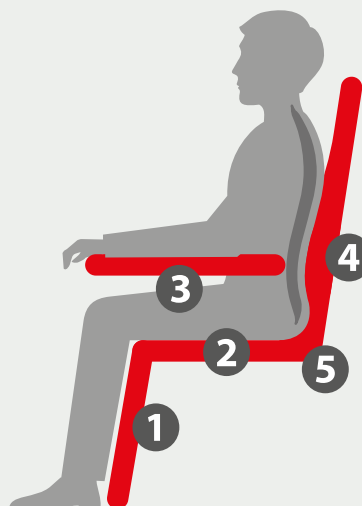

Een oplossing voor ieder zitprobleem

Mensen kunnen met veel verschillende zitproblemen kampen. Wij hebben hier jarenlange ervaring mee en weten dat zulke problemen vaak veel invloed hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven. Om hier goed op in te spelen, hebben we voor de Fitform 570 Vario een groot aantal opties en speciale aanpassingen beschikbaar. Hiermee kan vrijwel elk zitprobleem verlicht worden. Daarnaast heeft de Fitform 570 Vario een aantal handige accessoires voor extra comfort.

Exact op maat

Buiten de standaard instelmaten van de Fitform 570 Vario zijn nog veel andere maten mogelijk.

De zitdiepte is standaard instelbaar in 6 maten: 43 – 45 – 47 – 49 – 51 – 53 cm. Ondiepere en diepere zitdiepten zijn echter ook mogelijk.

De instelbare zithoogte is 40-60 cm. Een zithoogte van 36 cm, 37 cm, 38 cm en 39 cm, behoort ook tot de mogelijkheden. Daartoe wordt een ander zitkussen gebruikt.

De instelbare arMLEuninghoogte is 16 - 29 cm. Als een lagere of hogere arMLEuninghoogte nodig is, dan wordt dat speciaal vervaardigd.

De standaard zitbreedte is 51 cm, echter de fauteuil is ook leverbaar met een zitbreedte van 45 cm en 57 cm. Als de fauteuil nog breder wordt, noemen we hem de Fitform 570 Vario Grande.

Ook de rugleuninghoogte kan lager of hoger worden gemaakt.

Speciale aanpassingen

Materialen voor de zitting

Standaard is de zitting van een Fitform-fauteuil uitgevoerd in vormschuim. Deze schuimkwaliteit zorgt voor een goede vormvastheid en duurzaamheid en voelt comfortabel en stevig aan. Het is mogelijk om te kiezen voor andere materialen, bijvoorbeeld een zachtere zitting met latex of een antidecubitus zitting met traagschuim, dat zich vormt naar het lichaam. Voor mensen die heel langdurig zitten, met veel decubitus risico, wordt Intelli-Gel aangeraden. Dit is een gelzitting met een optimale drukverdeling. In de Fitform 570 Vario kan ook een specifiek antidecubitus zitkussen worden verwerkt. Dit gebeurt met behulp van een uitwisselbaar zittingsysteem, afhankelijk van iemands persoonlijke situatie (drempelzitting of gestoffeerde zittingplaat).



Fitform 570 Vario Grande



Latex en traagschuim



Intelli-Gel® kussens



Arthrodese zitting

Materialen voor de rugleuning

De rugleuning van de Fitform 570 Zorgfauteuil is standaard uitgevoerd in vormschuim.

Deze schuimkwaliteit voelt comfortabel en stevig aan, is vormvast en daarmee duurzaam. Het is mogelijk om te kiezen voor zachtere materialen zoals latex of traagschuim.

Materialen voor de arMLEUNINGEN en/of BEENSTEUN

Voor mensen die zeer gevoelig zijn onder de armen of benen kan gekozen worden voor zeer zachte en/of drukverlagende materialen.

Speciale bekledingen

De bekledingsstof waarin de Fitform 570 Vario doorgaans wordt uitgevoerd, is de comfortabel aanvoelende stof Divine. De Fitform 570 Vario kan ook geheel of deels worden uitgevoerd in een waterafstotende Stamskin kunststof bekleding, inzetbaar bij incontinentie. Deze bekleding is bacteriewerend, eenvoudig in onderhoud en geschikt voor ruimten waarin optimale hygiëne vereist is.

Bij incontinentie kan ook worden gekozen voor een Niroxx bekleding. Deze is waterafstotend, schimmelwerend en antibacterieel behandeld, maar toont en voelt meer als gewone bekledingsstof. De bekledingsstof Uniform is elastisch en daardoor naar beide zijden goed rekbaar. Deze stof wordt ingezet om ervoor te zorgen dat individuele vorm aanpassingen in de zitting of de rugleuning goed tot zijn recht komen. De bekleding Sarkotex is van een elastische kunststof die goed rekbaar, waterdicht en luchtdoorlatend is. Alle bekledingen zijn brandwerend behandeld.

Arthrodese zitting

Dit is een gedeelde zitting, speciaal voor mensen met problemen aan heup en/of knie. Het linker- en/of rechtergedeelte kan onafhankelijk van elkaar ingesteld worden. Bij een geopende beensteun is dit aan de onderzijde van de zitting in te stellen (bereik ca. 8 cm). In combinatie met de onafhankelijke rugverstelling kan men de juiste rughoek bepalen. Bij het uitkomen van de beensteun komt de zitting automatisch omhoog voor een goede beenondersteuning en kan men d.m.v. de rugverstelling weer dezelfde hoek verkrijgen als dit gewenst is. Voor elke zittdiepte wordt een speciale zitting gemaakt. Het vaste (niet instelbare) gedeelte is altijd 12 cm.

Bij deze optie is de beensteun niet doorgestoffeerd, maar uitgevoerd met een zogenaamd 'binnenvoetenbord'.

Kyphose rugleuning instelbaar

Bij deze rugleuning wordt het middengedeelte extra zacht uitgevoerd middels zachter schuim. Samen met instelbare singelbanden zorgt dit ervoor dat personen met een kyphose (ronde rug) comfortabeler in de stoel kunnen zitten. Deze rugleuning heeft een tweetal knikpunten, om ervoor te zorgen dat deze nog beter aansluit op de rug.

Verbrede arMLEUNINGEN

Om de rompstabiliteit en de armondersteuning te optimaliseren, kunnen de gestoffeerde arMLEUNINGEN naar binnen of naar buiten toe verbreed worden.



ILP rugleuning & ILP PLUS rugleuning



Hemiplegie armondersteuning



APPR systeem



Extra verlengde beensteun

Wanneer een Fitform-fauteuil op maat is, is de beensteun precies zo lang dat de hakken net over het uiteinde heen liggen. Dit is van belang om overstrekking van de benen te voorkomen. Is er een reden dat de beensteun toch langer moet zijn (bijvoorbeeld wanneer iemand wat zwaardere aangepaste schoenen draagt) dan kan er gekozen worden voor een extra verlengde beensteun.

Kuiprugleuning

Deze rugleuning wordt in een kuipvorm opgebouwd (zoals bij een autostoel), zodat men extra steun krijgt in de zij. Dit zorgt voor meer stabiliteit en minder wegzakken naar de zijkant.

ILP rugleuning & ILP PLUS rugleuning

De ILP rugleuning is zo geconstrueerd dat met behulp van losse pelotten in verschillende maten de juiste individuele zij-ondersteuning kan worden gecreëerd. Ideaal voor mensen met balansproblemen bij wie een standaard kuiprugleuning niet voldoende is.

Als deze balansproblemen ernstig van aard zijn, kan de ILP PLUS rugleuning worden ingezet.

Hier zijn de losse pelotten gemonteerd op in hoogte verstelbare platen. Daarmee wordt het lichaam als het ware gestabiliseerd.

Air positioning & pressure relief (APPR) systeem

De zitting en rugleuning van de stoel zijn bij dit systeem voorzien van speciale luchtelementen ten behoeve van drukverdeling en positionering.

In de zitting is het bekende ROHO Quadro® Select® AD zitkussens verwerkt. In de rugleuning zijn diverse opblaasbare compartimenten verwerkt, waarmee iemand zeer individueel kan worden gepositioneerd. De lucht kan via een kleine handpomp in de luchtkussens worden ingebracht. Zowel in de zitting als in de rugleuning blijft een geringe hoeveelheid lucht constant in beweging. Naar gelang de houding die de persoon aanneemt, past de luchtverdeling zich vanzelf aan (constant reducerende krachten).

Hemiplegie armlleuning (draaibaar) [links of rechts]

Speciaal ontwikkeld voor mensen met een halfzijdige verlamming. De hemiplegie armlleuning wordt aan de zitting gemonteerd, zodat deze meegaat in de kantelverstelling.

Er zijn 4 verschillende modellen beschikbaar.

- Vlak
- Pronatie
- Suppinatie rechts
- Suppinatie links

De hemiplegie armlleuning is standaard gestoffeerd in 3 mm zwart neopreen. Het is ook mogelijk om de hemiplegie armlleuning mee te laten stofferen in de bekleding van de stoel.

Aanvullend kan een zogenaamde polsfixatieband worden meegeleverd.

Zwenkbaar zijpand, manueel of elektrisch bedienbaar

Speciaal voor rolstoelgebruikers is het mogelijk om de stoel uit te rusten met een zwenkbaar zijpand, zodat een transfer gemakkelijker wordt.



Zwenkbaar zijpand



Hoofd- en nekkussens



Draaiplateau

Opties & accessoires

Om het gebruik van de Fitform-fauteuil verder te veraangenamen, bieden wij een groot aantal opties en accessoires.

Hoofd- en nekkussens

Voor een optimale individuele ondersteuning biedt Fitform diverse vormen en maten hoofd- en nekkussens. Ze zijn leverbaar met voorgevormde vulling of met een losse vulling.

Draaiplateau

Hiermee wordt de Fitform-fauteuil omgetoverd tot een draaifauteuil. Het draaiplateau kan draaien in alle standen, maar wordt vergrendeld in de sta-opstand in verband met veiligheid.

Accu

Een accu is ideaal wanneer de Fitform-fauteuil midden in de kamer komt te staan en het niet wenselijk is dat daar een stroomdraad loopt. De accu geeft een piepsignaal af wanneer deze opgeladen dient te worden. Bij normaal gebruik is dat ongeveer om de 14 dagen.

Verwarming

Heerlijk in de koude wintermaanden: verwarming van de zitting en de rugleuning. In verschillende graden instelbaar, goed voor spieren en gewrichten. De verwarming wordt bediend met een apart bedieningskastje.

Infrarood handbediening

De infraroodbediening maakt het mogelijk om de Fitform-fauteuils op afstand te bedienen met een snoerloos bedieningskastje. De infraroodbediening moet wel in de buurt van de fauteuil worden gebruikt.



Elektrisch bedienbare 'topswing' hoofdsteun

De Fitform 570 Vario beschikt standaard over een scharnier in de rugleuning waarmee het hoofddeel van de rugleuning handmatig naar voren kan worden versteld. Deze topswing verstelling kan desgewenst ook met een motor worden aangestuurd.

Memory functie

Voor mensen die graag snel hun lievelingsstand willen opzoeken, is de memory functie een uitkomst. Twee posities kunnen worden voorgeprogrammeerd.

Elektrisch bedienbare lendensteun

In de Fitform 570 vario zit standaard een in hoogte verstelbaar en opblaasbaar lendenkussentje in de rugleuning. Hiermee kan optimale ondersteuning van de lage rug worden gecreëerd. Voor mensen die deze steun regelmatig willen variëren, kan een elektrische bediening zinvol zijn.

Topline uitvoering

Combineert u de luxe opties: verwarming, de memory functie, de elektrisch bedienbare topswing hoofdsteun en de elektrisch bedienbare lendensteun, dan kunnen wij dit voordeliger produceren. Dit pakket noemen wij de Topline uitvoering.





Leeslampje



Wielsysteem Mobility Kit



Transparant en houten eettafel

Wielsysteem zelfremmend

Indien het voor de gebruiker prettig is om de stoel wat gemakkelijker te kunnen verplaatsen, dan is een zelfremmend wielsysteem beschikbaar. Dit systeem wordt ontgrendeld door aan de achterkant van de rugleuning de hendel achter de ritsluiting omhoog te bewegen. Nu kan de fauteuil verplaatst worden.



Wielsysteem Mobility Kit

Bij dit wielsysteem is het mogelijk om iemand te verplaatsen terwijl hij of zij in de fauteuil zit. Dit systeem wordt ontgrendeld door aan de achterkant van de rugleuning de hendel aan de bovenzijde omlaag te bewegen. Nu kan de fauteuil verplaatst worden. Wanneer iemand in de fauteuil zit, is het zinvol de beensteun een klein stukje uit te zetten zodat de voeten niet opgetild hoeven te worden. De fauteuil kan dan verplaatst worden over een vlakke ondergrond. Dit wielsysteem is niet geschikt om over drempels of andere obstakels heen te rijden.

Incontinentiemat

Dit is een handige, uitwasbare inlegmat voor op de zitting die van pas komt wanneer er een risico op een ongelukje is. De bovenzijde is uitgevoerd in de bekleding van de stoel en de onderzijde met een materiaal dat geen vocht doorlaat.

Verrijdbare, verstelbare tafel

Met behulp van deze los verrijdbare tafel kun je in de Fitform-fauteuil lezen, werken, eten, enzovoorts. De tafel is in hoogte verstelbaar en daarmee geheel aanpasbaar aan de stoel.



Het grote tafelblad is ook instelbaar in een schuine stand, voor een optimale werkpositie. Het kleine blad blijft dan horizontaal. Ideaal voor bijvoorbeeld een kopje koffie! De tafelhoogte kan variëren van 70-91 centimeter en de breedte is instelbaar tussen 72-122 centimeter. De tafel kan maximaal 15 kilo dragen.

Leeslampje

Deze elegante verlichting die wordt gemonteerd op de stoel, zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om in de stoel goed verlicht te lezen. Het LED lampje is zuinig in gebruik, gaat ruim 100.000 branduren mee en geeft weinig tot geen warmte af.



Houten of transparante werktafel

Deze werktafel is op de juiste hoogte instelbaar en kan aan de linker- of rechterkant van de stoel gemonteerd worden. Ideaal voor de maaltijd, een laptop of boek. Het tafelblad wordt aangepast aan de maat van de stoel. Leverbaar in transparant plexiglas en blank houtlaminaat.

Eettafel



Eten of werken in de fauteuil kan ook met behulp van een transparant of houten eettafel. Het eettafel is zo geconstrueerd dat het gemakkelijk over de armleuningen van de Fitform 570 Vario kan worden geschoven. Het table kan eenvoudig worden opgeborgen door het op te hangen aan de speciale knoppen aan het zijpand van de stoel.

Opties en accessoires zijn niet altijd met elkaar te combineren en niet altijd mogelijk in alle verschillende maten. De Fitform-specialist kan daarover nader informeren.

Bewegen tijdens het zitten

Omdat bewegen beter is dan zitten, kunnen in de Fitform 570 Vario twee verschillende bewegingstechnieken worden geïntegreerd. Dit zijn RCPM en fitMotion. RCPM helpt in de strijd tegen rugklachten. fitMotion is met name geschikt voor mensen die lang stilzitten en een risico lopen op decubitus.

Lees de uitgave 'Fitform & Gezond zitten' voor uitgebreide informatie over deze beweegmodules. Of kijk op www.fitform.nl/over-zitten.

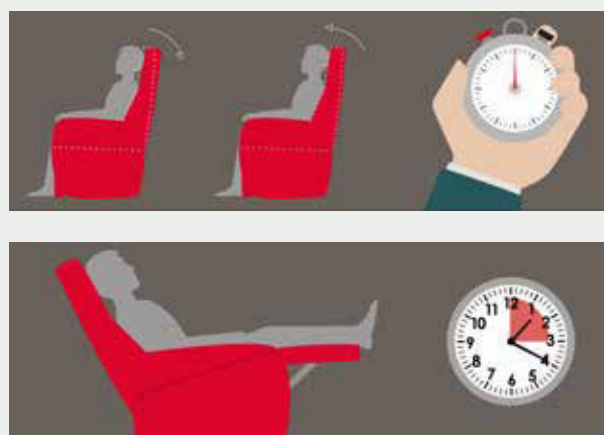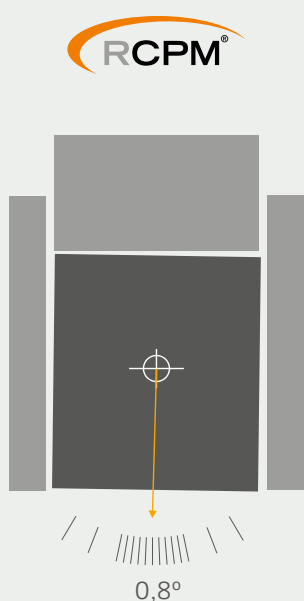

Keurmerk en aanbevelingen

De **Vereniging Aktion Gesunder Rücken (AGR)** in Duitsland heeft als hoofddoel de preventie van rugklachten. Ze ziet het als een van haar belangrijkste taken om mensen te adviseren over producten die 24 uur per dag rugklachten kunnen voorkomen. AGR heeft een keurmerk in het leven geroepen: het AGR Gütesiegel. Om hiervoor in aanmerking te komen, doen onafhankelijk deskundigen uitvoerig productonderzoek. In 2000 kreeg Fitform het AGR-keurmerk voor haar Fitform-fauteuils. Kijk voor meer informatie op www.agr-ev.de.



NVVR De Wervelkolom is de patiëntenvereniging voor rugpatiënten in Nederland. Fitform-fauteuils zijn door deze vereniging officieel erkend als de meest rugvriendelijke stoelen van ons land. Kijk voor meer informatie op www.nvvr.nl.

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen
Wellco, het bedrijf waar de Fitform-fauteuils worden gemaakt, voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Voor meer informatie: www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl



Persoonlijke situatie	Mogelijke zitoplossingen
allergie	bekleding stamskin
rompbalansprobleem, beperkt aanwezig	kuiprugleuning
rompbalansprobleem, nadrukkelijk aanwezig	ILP rugleuning
rompbalansprobleem, ernstig	ILP PLUS rugleuning
bolle rug, kyphose aanwezig	instelbare kyphose rugleuning
decubitus onder zitvlak reeds aanwezig (EPUAP grade 2)	Intelli-Gel zitting, APPR zitsysteem (Roho Quattro ingestoffeerd)
decubitus risico onder zitvlak	antidecubitus zitting traagschuim voor verschillende lichaamsgewichten
decubitus risico onderrug en/of bovenrug	rugleuning met laag traagschuim of latex of geheel in traagschuim of latex
decubitus risico op onderbenen	traagschuim op beensteun
decubitus risico op onderarmen	traagschuim op armleuningen
gevoelige huid onder zitvlak, sterk vermagerd persoon	zachte zitting voor verschillende lichaamsgewichten
gevoelige huid onderarmen	latex laag op de armleuningen
gevoelige huid onderrug	rugleuning met laag latex of geheel in latex
gevoelige huid onderbenen	latex laag op beensteun
halfzijdige verlamming	hemiplegie armleuning
incontinentie beperkt aanwezig	incontinentemat voor zitting, bekleding Niroxx, zitting + rugleuning bekleed in stamskin
incontinentie nadrukkelijk aanwezig	bekleding stamskin gehele stoel
incontinentie + decubitus risico	antidecubitus zitting (traagschuim of Intelli-Gel) in combinatie met Sarkotex bekleding
incontinentie + decubitus reeds aanwezig	Intelli-Gel zitting, APPR zitsysteem (Roho Quattro ingestoffeerd) met Sarkotex bekleding
langdurig stil zitten, weinig bewegen	fitMotion beweegstelsel
mentale problemen, moeite met bediening van de stoel	Fitform Vario M1 met 1 motor en slechts 2 bedieningsknoppen
neklachten	hoofdkussen nr. 5 druppelvorm met zachte vulling, elektrisch bedienbare hoofddeun
neiging dat armen van leuningen afvallen	verbrede armleggers naar binnen of naar buiten
noodzaak de persoon te kunnen positioneren in de zitting (bekken stabiliseren)	APPR zitsysteem met Roho Quattro ingestoffeerd (uniform of sarkotex bekleed)
noodzaak de persoon te kunnen verplaatsen, zittend in de stoel	mobility kit wielsysteem
noodzaak om de stoel te kunnen verplaatsen zonder dat de persoon erin zit	zelfremmend wielsysteem
noodzaak om dagelijkse activiteiten te kunnen verrichten vanuit de stoel	diverse tafel opties + leeslampje aan de stoel
noodzaak om de hielen te ondersteunen (orthopedisch schoeisel)	extra verlengde beensteun
problemen met knie- en heup	arthrodese zitting in combinatie met rugleuning verstelling
reumatische aandoeningen, snel koud, sterk vermagerd	verwarming in zitting en rugleuning
risico dat persoon valt over snoer in de kamer	accu
risico dat de benen van de beensteun afglijden	pelotten op beensteun
scoliose	ILP rugleuning of ILP PLUS rugleuning
spasticiteit	bekleding stamskin i.v.m. intensief gebruik
spierziekte	opstabeweging nr. 5, rechtstandig omhoog, opstasysteem extra hoog
rolstoelgebruiker met goede arm/handfunctie	zwenkbaar zijpand, manueel bedienbaar
rolstoelgebruiker met beperkte arm/handfunctie	zwenkbaar, wegklapbaar zijpand, elektrisch bedienbaar
rugklachten	verstelbare lendensteun, eventueel elektrisch bedienbaar, RCPM zitsysteem
verkrampde spieren	fitMotion beweegstelsel
Persoonlijke maten	Mogelijke zitoplossing en maatoplossing buiten de instelmatten van de stoel
dun, smal persoon	zitbreedte 45 cm
dun, klein persoon	zithoogte 36-37-38-39 cm, zitdiepte 39-41 cm, mini Vario 571 (zitbreedte 45 cm en rugleuninghoogte 72 cm)
klein persoon	zithoogte 36-37-38-39 cm, zitdiepte 39-41 cm, rugleuninghoogte 72 cm
zwaardere persoon	zitbreedte 57 cm evt. met mechaniekverzwaring of Vario Grande, stevige zitting.
lang persoon	rugleuning 94 of 104 cm, zitdiepte 55, 57 of 59 cm

Fitform 570 Vario verstrekt door de zorgverzekeraar?

Er zijn ernstige zitproblemen die niet kunnen worden opgelost met een stoel die aan normale ergonomische eisen voldoet. In deze situatie zijn er speciale aanpassingen nodig, bijvoorbeeld een specifieke polstering, een arthrodese zitting of pelottes voor zijwaartse steun. Een stoel met dergelijke aanpassingen kan worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Dit kan aan de orde zijn bij onder andere ernstige rompbalansproblemen, ernstige kyphose of scoliose, spasticiteit en bewegingsbeperking aan heup of knie.



Medische beoordeling

Om de medische noodzaak te kunnen beoordelen, vraagt een zorgverzekeraar een verklaring van een behandelend arts en/of therapeut. Het is van groot belang dat de voorschrijvend arts of ergotherapeut de zitproblemen en de benodigde individuele aanpassingen aan zitting en/of rugleuning helder verwoordt. Het is ook belangrijk dat duidelijk aangegeven wordt waarom de zitproblemen niet gecompenseerd kunnen worden met een stoel die voldoet aan normale ergonomische eisen.

Passing en levering

De passing en de levering van een aan functiebeperking aangepaste fauteuil, en soms ook de beoordeling van de aanvraag, wordt gedaan door gecontracteerde gespecialiseerde revalidatiedealerbedrijven.

In bruikleen

De aangepaste fauteuil wordt doorgaans in bruikleen verstrekt. Samen met de revalidatiespecialist wordt bepaald met welke aanpassingen de Fitform 570 Vario in een specifieke situatie zal worden uitgevoerd.

Bekledingsstof

Een aangepaste fauteuil die geleverd wordt via een zorgverzekeraar, wordt standaard gestoffeerd in de bekledingsstof Divine of - in geval van incontinentie - in de bekleding Stamskin. De gebruiker kan kiezen uit diverse kleuren.

Als de fauteuil niet wordt verstrekt door een zorgverzekeraar en de gebruiker de aanschaf zelf financiert, kan gekozen worden uit een uitgebreidere collectie bekledingssoorten en kleuren.

Uw Fitform-dealer

